

INSTRUÇÃO DE USO

Descrição e especificação técnica

Nome Comercial: Tala Nasal Soft Gel Canulada

Nome Técnico: Talas

Composição
Polipropileno e Policarbonato.

Componentes / Especificações			
Modelo	Diâmetro	Tamanho	Canulado
RRR-21	11,0mm	40,0 mm	Sim
RRR-22	11,0 mm	30,0 mm	Sim
RRR-23	11,0 mm	50,0 mm	Sim

Produto de uso único. Destruir após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada.

VER INSTRUÇÕES DE USO.

Proibido reprocessar.

Produto estéril – esterilizado por gás de óxido de etileno.



1- ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

O uso deste produto deve ser restrito a profissionais com competência para a utilização do mesmo. Deve-se ter cuidado a fim de prevenir perfuração ou trauma dos revestimentos e tecidos, canais ou ductos associados. Após a retirada dos produtos da embalagem, inspecione-os a fim de detectar a existência de dobras, torções ou outros danos. Se for detectada qualquer anomalia que impossibilite o seu funcionamento em boas condições, os produtos não devem ser utilizados. Entrar em contato com a Humanna Medica. Certificar-se de que a descrição e dimensões do produto são adequadas ao procedimento a ser realizado.

2- FINALIDADE / INDICAÇÃO:

A Tala Nasal Soft-Gel Canulada é composta por 2 Splints nasais canulados, de tamanhos iguais, um para ser colocado na narina direita e o outro na narina esquerda. Têm a finalidade de manter as narinas sem obstrução e com ventilação após o procedimento cirúrgico, sendo que devem permanecer nas narinas de 07 a 10 dias, dependendo da avaliação médica.

3- CONTRA INDICAÇÕES:

O produto é contraindicado em pacientes que não toleram procedimentos nasais.

4- INSTRUÇÕES DE USO:

- 1- Posicione o paciente de acordo com o procedimento;
- 2- Verifique o kit adequado em relação aos tamanhos dos componentes;
- 3- Limpe a cavidade a ser colocada a Tala Nasal Soft-Gel Canulada;
- 4- Introduza a tala nasal lentamente na narina escolhida;
- 5- Após o uso, elimine o produto de acordo com os procedimentos padrão para resíduos com potencial risco biológico.

Nota 1:

Examinar cuidadosamente o produto e a embalagem estéril a fim de confirmar a inexistência de danos durante o transporte, além de verificar, na rotulagem do produto, se o tamanho da Tala Nasal Soft-Gel Canulada é o indicado para o procedimento a ser realizado.

Atenção: Período indicado para remoção é de 5 a 7 dias.

OBS: As informações acima são apenas orientavas, devendo o profissional habilitado selecionar a melhor técnica cirúrgica para cada paciente.

5- ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO:

Armazenar e transportar o produto em temperatura ambiente controlada (15 °C a 30 °C) em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

Realizar periodicamente a rotação no estoque de forma que os produtos sejam utilizados antes da expiração da data de validade da esterilização indicada no rótulo.

6- AVISO:

A Humanna Medical não se responsabilizará por quaisquer perdas, despesas incidentais, bem como pelo mau funcionamento do produto devido a utilização indevida/incorrecta do mesmo, incluindo o manuseio, o armazenamento e uso em pacientes (procedimento cirúrgico, diagnóstico).

7- **FABRICADO POR:**

HUMANNA MEDICAL LTDA
RUA ALIPHIA ZAHETER KFURI nº 80, VALE DOJEQUITIBÁ
GUAPIMIRIM | RJ – BRASIL

CEP: 25946-610

Registro ANVISA: 81637610010

Responsável Técnico: Danilo Vieira de Alcantara

CRF- RJ: 14.094

Site: www.humannamedical.com.br

E-mail: diretoria@humannamedical.com.br

Telefone: +55 21 2010-7770