

INSTRUÇÃO DE USO

Descrição e Especificação Técnica:

Nome do produto: Tampão Nasal Biocell

Nome Técnico: Tampão

Composição
Hidroxilato de Polivinil Acetato + Polipropileno (PC).

COMPONENTES			
Modelo	Diâmetro	Largura	Comprimento
MLL-25	1.5mm	20.0mm	45.0mm
MLL-26	1.5mm	20.0mm	80.0mm
MLL-27	1.5mm	30.0mm	80.0mm
MLL-28	1.0mm	20.0mm	45.0mm
MLL-29	1.0mm	20.0mm	80.0mm
MLL-30	1.0mm	30.0mm	80.0mm

Produto de uso único. Destruir após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada.

VER INSTRUÇÕES DE USO.

Proibido reprocessar.

Produto estéril – esterilizado por gás de óxido de etileno.

1- INSTRUÇÕES DE USO:

- 1- Posicione o paciente de acordo com o procedimento;
- 2- Verifique o modelo adequado em relação ao tamanho;
- 3- Limpe a cavidade a ser colocada o Tampão Nasal Biocell;
- 4- Introduza a cânula lentamente na narina escolhida.
- 5- Após o uso, elimine o produto de acordo com os procedimentos padrão para resíduos com potencial risco biológico.

OBS: As informações acima são apenas orientativas, devendo o profissional habilitado selecionar a melhor técnica cirúrgica para cada paciente.

Nota 1: Examinar cuidadosamente o produto e a embalagem estéril a fim de confirmar a inexistência de danos durante o transporte, além de verificar, na rotulagem do produto, se o tamanho do dispositivo é indicado para o procedimento a ser realizado.

Nota 2: Realizar técnicas assépticas durante todo o procedimento incluindo a utilização de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), campos e instrumentos estéreis.

2- ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

O uso deste produto deve ser restrito a profissionais com competência para a utilização do mesmo. Deve-se ter cuidado a fim de prevenir perfuração ou trauma dos revestimentos e tecidos, canais ou dutos associados.

Após a retirada dos produtos da embalagem, inspecione-os a fim de detectar a existência de dobras, torções ou outros danos. Se for detectada qualquer anomalia que impossibilite o seu funcionamento em boas condições, os produtos não devem ser utilizados. Entrar em contato com a Humanna Medical.

- Por se tratar de um produto estéril, após o uso, o mesmo deve ser descartado;
- Cabe ao cirurgião responsável, o domínio e a aprendizagem das técnicas a serem utilizadas;
- Antes de utilizar este produto, leia atentamente as instruções de uso;
- Certificar-se de que a descrição e dimensões do produto são adequadas ao procedimento a ser realizado.

3- FINALIDADE / INDICAÇÃO:

É indicado para manter as narinas sem obstrução e com ventilação após procedimentos cirúrgicos, evitando sangramentos.

4- ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO:

Armazenar e transportar o produto em temperatura ambiente controlada (15 °C a 30 °C) em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

Realizar periodicamente a rotação no estoque de forma que os produtos sejam utilizados antes da expiração da data de validade indicada no rótulo.

5- AVISO :

A HUMANNA MEDICAL não se responsabilizará por quaisquer perdas, danos ou despesas incidentais, bem como pelo mau funcionamento do produto, devido a utilização indevida/ incorreta do mesmo, incluindo o manuseio, armazenamento e uso em pacientes (procedimentos cirúrgicos e diagnósticos).

A HUMANNA MEDICAL se abstém da responsabilidade referente a reutilização, reprocessamento ou reesterilização dos produtos, como também de outros assuntos fora do controle da indústria.

6- FABRICADO POR:

HUMANNA MEDICAL LTDA
RUA ALIPHIA ZAHETER KFURI nº 80
VALE DO JEQUITIBÁ
GUAPIMIRIM | RJ – BRASIL
CEP: 25946-610

Registro ANVISA: 81637610020

Responsável Técnico: Danilo Vieira de Alcantara
CRF- RJ: 14094

Site: www.humannamedical.com.br

E-mail: diretoria@humannamedical.com.br

Telefone: +55 21 2010-7770