



INSTRUÇÃO DE USO

Descrição e Especificação Técnica:

Nome do Produto: Set Cânulas FESS PROTECT

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

O Set Cânulas FESS PROTECT é fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) + Aço Inoxidável 304 ASTM.

Componentes:

Set Cânulas FESS PROTECT		
Variações		
Modelo	Comprimento cm	Composição
MMM-100	18 cm	Cânula com Irrigação Autônoma 0º
	18 cm	Cânula com Irrigação Autônoma 30º
	18 cm	Cânula com Irrigação Autônoma 44º
	120 cm	Tubo de Silicone
MMM-200	20 cm	Cânula com Irrigação Autônoma 0º
	20 cm	Cânula com Irrigação Autônoma 30º
	20 cm	Cânula com Irrigação Autônoma 40º
	120 cm	Tubo de Silicone

Produto de uso único. Destruir após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada.

VER INSTRUÇÕES DE USO.

Proibido reprocessar. Produto estéril – esterilizado por gás de óxido de etileno.

Finalidade / Indicação:

Set Cânulas FESS PROTECT são utilizados em procedimentos cirúrgicos nos seios faciais.

Advertências e Precauções:

O uso deste produto deve ser restrito a profissionais com competência para a utilização do mesmo. Deve-se ter cuidado a fim de prevenir perfurações ou traumas dos revestimentos e tecidos, canais ou dutos associados.

Após a retirada dos produtos da embalagem, inspecione-os a fim de detectar a existência de dobras, torções ou outros danos. Se for detectada qualquer anomalia que impossibilite seu funcionamento, os produtos não deverão ser utilizados. Entrar em contato com Humanna Medical (Tel/Fax: (55) 21 2010-7770).

Certificar-se de que a descrição e dimensões do produto são adequadas ao procedimento a ser realizado.

Contra Indicações:

O dispositivo é contraindicado em pacientes que não toleram procedimentos nos seios faciais.

Nota 1: : Examinar cuidadosamente o produto e a embalagem estéril a fim de confirmar a inexistência de danos durante o transporte, além de verificar, na rotulagem do produto, se o tamanho da cânula é indicado para o procedimento a ser realizado.

Nota 2: Realizar técnicas assépticas durante todo o procedimento incluindo a utilização de EPI's (Equipamento de Proteção Individual), campos e instrumentos estéreis.

Instruções de Uso:

- 1 - Verifique o kit adequado em relação aos tamanhos dos componentes.
- 2 - Insira a cânula com irrigação sobre a ótica.
- 3 - Cerfique-se que está bem encaixada.

- 4 - Conecte o tubo de silicone na conexão luer lock da cânula.
- 5 - Conecte o tubo de silicone no vácuo do hospital ou na irrigação.
- 6 - Insira a cânula raspadora do tamanho apropriado para raspar o corte.
- 7 - Após o uso, elimine o produto de acordo com os procedimentos padrões para resíduos com potencial de risco biológico.

OBS: As informações acima são apenas orientavas, devendo o profissional habilitado selecionar a melhor técnica cirúrgica para cada paciente.

Armazenamento, Transporte e Conservação:

Armazenar e transportar o produto em temperatura ambiente controlada (15 °C a 30 °C) em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

Realizar periodicamente a rotação no estoque de forma que os produtos sejam utilizados antes da expiração da data de validade da esterilização indicada no rótulo.

AVISO :

A HUMANNA MEDICAL não se responsabilizará por quaisquer perdas, danos ou despesas incidentais, bem como pelo mau funcionamento do produto devido a utilização indevida/incorreta do mesmo, incluindo o manuseio, armazenamento e uso em pacientes (procedimentos cirúrgicos e diagnósticos).

A HUMANNA MEDICAL se abstém da responsabilidade referente a reutilização, reprocessamento ou reesterilização dos produtos, como também de outros assuntos fora do controle da indústria.

FABRICADO POR:

HUMANNA MEDICAL LTDA.
RUA ALIPHIA ZAHETER KFURI nº 80, VALE DO JEQUITIBÁ,
GUAPIMIRIM | RJ – BRASIL – CEP: 25946-610

Registro ANVISA: 81637610022

Responsável Técnico: Danilo Vieira de Alcantara / CRF- RJ: 14094

Site: www.humannamedical.com.br

E-mail: diretoria@humannamedical.com.br

Telefone: (21) 2010-7770