

## INSTRUÇÃO DE USO

### Descrição e Especificação Técnica:

**Nome do Produto:** Tala Nasal Externa Thermo-moldável

**Nome Técnico:** Talas

| Composição                            |
|---------------------------------------|
| Poliéster sintético de polímero (PP). |

| Tala Nasal Externa Thermo-moldável |          |         |             |                      |
|------------------------------------|----------|---------|-------------|----------------------|
| Modelo                             | Diâmetro | Largura | Comprimento | Temperatura Moldagem |
| HHH-24                             | 0,5 mm   | 80 mm   | 100 mm      | 20° / 30°            |
| HHH-25                             | 0,5 mm   | 100 mm  | 100 mm      | 20° / 30°            |
| HHH-26                             | 0,5 mm   | 60 mm   | 80 mm       | 20° / 30°            |
| HHH-27                             | 0,5 mm   | 65 mm   | 45 mm       | 20° / 30°            |
| HHH-28                             | 0,5 mm   | 55 mm   | 40 mm       | 20° / 30°            |
| HHH-29                             | 0,5 mm   | 59 mm   | 39 mm       | 20° / 30°            |

**Produto de uso único.**

**Destruir após o uso.**

**Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada.**

**Proibido reprocessar.**

**Produto estéril – esterilizado por gás de óxido de etileno.**

## 1- INSTRUÇÕES DE USO:

**Nota 1:** Examinar cuidadosamente o produto e a embalagem estéril a fim de confirmar a inexistência de danos durante o transporte, além de verificar, na rotulagem do produto, se o tamanho da Tala Nasal Externa Thermo-moldável é o indicado para o procedimento a ser realizado.

**Nota 2:** Realizar técnicas assépticas durante todo o procedimento incluindo a utilização de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), campos e instrumentos estéreis.

- 1- Posicione o paciente de acordo com o procedimento;
- 2- Verifique o kit adequado em relação aos tamanhos dos componentes;
- 3- Limpe o dorso do nariz a ser colocada a Tala Nasal.
- 4- Caso seja necessário moldar a tala coloque em água morna 20°- 30° Graus Celsius por 2 minutos.
- 5- Molde diretamente no nariz ou utilize o dedo.
- 6- Se for utilizado o nariz como molde volte a limpar seu dorso.
- 7- Utilize fita adesiva para fixar a tala no nariz.
- 8- Após o uso, elimine o produto de acordo com os procedimentos padrão para resíduos com potencial risco biológico.

***OBS: As informações acima são apenas orientativas, devendo o profissional habilitado selecionar a melhor técnica cirúrgica para cada paciente.***

## 2- ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

O uso deste produto deve ser restrito a profissionais com competência para a utilização do mesmo. Deve-se ter cuidado a fim de prevenir perfuração ou trauma dos revestimentos e tecidos, canais ou dutos associados.

Após a retirada dos produtos da embalagem, inspecione-os a fim de detectar a existência de dobras, torções ou outros danos. Se for detectada qualquer anomalia que impossibilite o seu funcionamento em boas

condições, os produtos não devem ser utilizados. Entrar em contato com a Humanna Medical. Certificar-se de que a descrição e dimensões do produto são adequadas ao procedimento a ser realizado.

### **3- FINALIDADE / INDICAÇÃO:**

A Tala Nasal Externa Thermo-moldável é indicada para ser colocada no dorso do nariz, após cirurgias nasais, para deixar o nariz em posição adequada.

### **4- CONTRA INDICAÇÕES:**

O produto é contraindicado em pacientes que não toleram procedimentos nasais.

### **5- ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO:**

Armazenar e transportar o produto em temperatura ambiente controlada (15 °C a 30 °C) em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Realizar periodicamente a rotação no estoque de forma que os produtos sejam utilizados antes da expiração da data de validade da esterilização indicada no rótulo.

### **6- AVISO:**

A Humanna Medical não se responsabilizará por quaisquer perdas, despesas incidentais, bem como pelo mau funcionamento do produto devido a utilização indevida / incorreta do mesmo, incluindo o manuseio, o armazenamento e uso em pacientes (procedimento cirúrgico, diagnóstico).

**7- FABRICADO POR:**

HUMANNA MEDICAL LTDA

RUA ALIPHIA ZAHETER KFURI nº 80  
VALE DO JEQUITIBÁ  
GUAPIMIRIM / RJ – BRASIL  
CEP: 25946-610

Registro ANVISA: **81637610028**

Responsável Técnico: Danilo Vieira de Alcantara / CRF- RJ: 14094

Site: [www.humannamedical.com.br](http://www.humannamedical.com.br)

E-mail: [diretoria@humannamedical.com.br](mailto:diretoria@humannamedical.com.br)

Telefone: +55 21 2010-7770