

INSTRUÇÃO DE USO

Descrição e Especificação Técnica:

Nome do Produto: Kit Cânula Naso Guard

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

Composição				
Polímero de alta densidade (PEAD), Aço Inoxidável 304 (Norma Técnica AISI 304) e silicone.				
Modelo	Componente	Diâmetro	Comprimento	Angulação
MMM-600	Cânula de Irrigação	5.0 mm	130.0mm	45°
	Tala Nasal Interna esquerda	9.5 mm	40.0mm	0°
	Tala Nasal Interna direita	9.5 mm	40.0mm	0°
	Tubo de silicone	3.5 mm	100.0mm	0°
MMM-700	Cânula de Irrigação	5.0 mm	130.0mm	0°
	Tala Nasal Interna esquerda	9.5 mm	40.0mm	0°
	Tala Nasal Interna direita	9.5 mm	40.0mm	0°
	Tubo de silicone	3.5 mm	100.0mm	0°

Produto de uso único. Destruir após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Proibido reprocessar.

Produto estéril – esterilizado por gás de óxido de etileno.

1- INSTRUÇÕES DE USO:

- a) Verifique o kit adequado em relação aos tamanhos dos componentes.
- b) Insira a Cânula com irrigação sobre a ótica.
- c) Certifique-se que está bem encaixada.
- d) Conecte o tubo de silicone na conexão Luer Lock da Cânula.
- e) Conecte o tubo de silicone no vácuo do hospital ou na irrigação.
- f) Após o uso, elimine o produto de acordo com os procedimentos padrão para resíduos com potencial de risco biológico.

Nota 1:

Se necessário utilize as talas nasais presentes neste kit.
--

OBS: As informações acima são apenas orientativas, devendo o profissional habilitado selecionar a melhor técnica cirúrgica para cada paciente

2- ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES:

O uso deste produto deve ser restrito a profissionais com competência para a utilização do mesmo. Deve-se ter cuidado a fim de prevenir perfurações ou traumas dos revestimentos e tecidos, canais ou dutos associados.

Após a retirada dos produtos da embalagem, inspecione-os a fim de detectar a existência de dobras, torções ou outros danos. Se for detectada qualquer anomalia que impossibilite seu funcionamento, os produtos não deverão ser utilizados. Entrar em contato com Humanna Medical.

Certificar-se de que a descrição e dimensões do produto são adequadas ao procedimento a ser realizado.

3- FINALIDADE/INDICAÇÃO:

O KIT CÂNULA NASO GUARD é utilizado em procedimentos cirúrgicos nos seios faciais.

4- CONTRA INDICAÇÕES:

O dispositivo é contra indicado em pacientes que não toleram procedimentos nos seios faciais.

Nota 2:
Examinar cuidadosamente o produto e a embalagem estéril a fim de confirmar a inexistência de danos durante o transporte, além de verificar, na rotulagem do produto, se o tamanho da cânula é indicado para o procedimento a ser realizado.

Nota 3:
Realizar técnicas assépticas durante todo o procedimento incluindo a utilização de (Equipamentos de Proteção Individual), campos e instrumentos estéreis.

5- ARMAZENAMENTO,TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO:

Armazenar e transportar o produto em temperatura ambiente controlada (15 °C a 30 °C) em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

Realizar periodicamente a rotação no estoque de forma que os produtos sejam utilizados antes da expiração da data de validade da esterilização indicada no rótulo.

6- AVISO:

A HUMANNA MEDICAL não se responsabilizará por quaisquer perdas, danos ou despesas incidentais, bem como pelo mau funcionamento do produto devido utilização indevida/incorreta do mesmo, incluindo o manuseio, armazenamento e uso em pacientes (procedimentos cirúrgicos e diagnósticos).

A HUMANNA MEDICAL se abstém da responsabilidade referente a reutilização, reprocessamento ou reesterilização dos produtos, como também de outros assuntos fora do controle da indústria.

7- FABRICADO POR:

HUMANNA MEDICAL LTDA.
RUA ALIPHIA ZAHETER KFURI nº 80, VALE DO JEQUITIBÁ,
GUAPIMIRIM | RJ – BRASIL – CEP: 25946-610

Registro ANVISA: 81637610039

Responsável Técnico: Danilo Vieira de Alcantara / **CRF- RJ:** 14094

Site: www.humannamedical.com.br

E-mail: diretoria@humannamedical.com.br

Telefone: +55 21 2010-7770