

## INSTRUÇÃO DE USO

### Descrição e Especificação Técnica:

**Nome Comercial:** KIT CÂNULA TONSILECTOMIA

**Nome Técnico:** KIT CIRÚRGICO

### Composição:

#### Descolador:

Manopla: Policarbonato (PC) / Haste e ponta: Aço inoxidável 304 AISI.

#### Aspirador:

Ponta de sucção / Cabo de Apoio de Mão / Extensor: PVC - Policloreto de Vinila, de Grau Médico, livre de f-talatos (USP Class VI e ISO);

Conexão: Politetrafluoretileno – PTFE.

| KIT CÂNULA TONSILECTOMIA    |          |             |        |                                                                                     |
|-----------------------------|----------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RRR-400                     |          |             |        |                                                                                     |
| Componente                  | Diâmetro | Comprimento | Ponta  | Imagem                                                                              |
| Mini descolador de amígdala | 3.0mm    | 15.0mm      | -----  |    |
| Mini cureta de beckman      | 3.0mm    | 15.0mm      | 20.0mm |    |
| Aspirador cirúrgico         | 8.0mm    | 200.0mm     | -----  |    |
| RRR-500                     |          |             |        |                                                                                     |
| Mini descolador de amígdala | 3.0mm    | 3.0mm       | -----  |  |
| Mini cureta de beckman      | 3.0mm    | 3.0mm       | 40.0mm |  |
| Aspirador cirúrgico         | 8.0mm    | 200.0mm     | -----  |  |

**Produto de uso único. Destruir após o uso.**

**Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada.**

**Proibido reprocessar.**

**Produto estéril – esterilizado por gás de óxido de etileno.**

### **Instruções de Uso:**

- 1) Posicione o paciente de acordo com o procedimento;
- 2) O procedimento deve ser feito sob fluoroscopia ou ultrassonografia;
- 3) Verifique o instrumento adequado em relação aos tamanhos dos componentes;
- 4) Insira os mini instrumentos de acordo com a técnica cirúrgica;
- 5) Retire os mini instrumentos;
- 6) Após o uso, elimine o produto de acordo com os procedimentos padrão para resíduos com o potencial risco biológico.

***OBS: As informações acima são apenas orientavas, devendo o profissional habilitado selecionar a melhor técnica cirúrgica para cada paciente***

### **Advertências e Precauções:**

O uso deste produto deve ser restrito a profissionais com competência para a utilização do mesmo. Deve-se ter cuidado a fim de prevenir perfurações ou traumas dos revestimentos e tecidos, canais ou dutos associados.

Após a retirada dos produtos da embalagem, inspecione-os a fim de detectar a existência de dobras, torções ou outros danos. Se for detectada qualquer anomalia que impossibilite seu funcionamento, os produtos não deverão ser utilizados. Entrar em contato com Humanna Medical (Tel/Fax: (55) 21 2010-7770).

Certificar-se de que a descrição e dimensões do produto são adequadas ao procedimento a ser realizado.

Por se tratar de produtos estéreis, após o uso devem ser descartados. Cabe ao cirurgião responsável, o domínio e a aprendizagem das técnicas utilizadas neste sistema.

Antes de utilizar o equipamento leia atentamente as instruções de uso.

O mau uso pode acarretar queimaduras aos pacientes.

Caso o Kit Cânula Tonsilectomia apresente qualquer falha, o mesmo deve ser descartado.

### **Finalidade / Indicações:**

O KIT CÂNULA TONSILIECTOMIA é utilizado em procedimentos cirúrgicos nas amígdalas. É utilizado para afastar, cortar e dissecar as amígdalas

### **Contra Indicações:**

O dispositivo é contra indicado em pacientes que não toleram procedimentos cirúrgicos.

**Nota 1:** Examinar cuidadosamente o produto e a embalagem estéril a fim de confirmar a inexistência de danos durante o transporte, além de verificar, na rotulagem do produto, se o tamanho da cânula é indicado para o procedimento a ser realizado.

**Nota 2:** Realizar técnicas assépticas durante todo o procedimento incluindo a utilização de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), campos e instrumentos estéreis.

### **Armazenamento e transporte:**

Armazenar e transportar o produto em temperatura ambiente controlada (15 °C a 30 °C) em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

Realizar periodicamente a rotação no estoque de forma que os produtos sejam utilizados antes da expiração da data de validade da esterilização indicada no rótulo.

### **AVISO:**

A HUMANNA MEDICAL não se responsabilizará por quaisquer perdas, danos ou despesas incidentais, bem como pelo mau funcionamento do produto devido a utilização indevida/incorrecta do mesmo, incluindo o manuseio, armazenamento e uso em pacientes (procedimentos cirúrgicos e diagnósticos).

A HUMANNA MEDICAL se abstém da responsabilidade referente a reutilização, reprocessamento ou reesterilização dos produtos, como também de outros assuntos fora do controle da indústria.



**FABRICADO POR:**

HUMANNA MEDICAL LTDA.

RUA ALIPHIA ZAHETER KFURI - nº 80, VALE DO JEQUITIBÁ,  
GUAPIMIRIM | RJ – BRASIL – CEP: 25.946-610

**Registro ANVISA: 81637610040**

Responsável Técnico: Danilo Vieira de Alcantara / **CRF- RJ: 14094**

Site: [www.humannamedical.com.br](http://www.humannamedical.com.br)

E-mail: [diretoria@humannamedical.com.br](mailto:diretoria@humannamedical.com.br)

Telefone: (21) 2010-7770