

INSTRUÇÃO DE USO

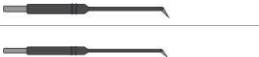
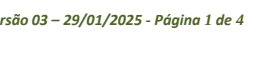
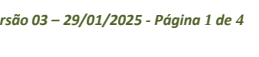
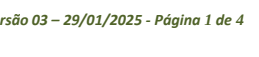
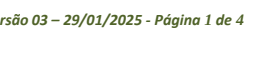
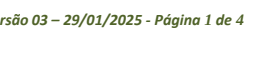
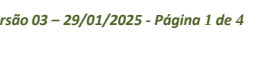
Descrição e Especificação Técnica:

Produto: Cânula de Microincisão Micro-Cort Plus

Nome Técnico: CABO/ELETRODO ELETROCIRÚRGICO (Potência maior que 50W)

Composição

Parilene, Aço Inoxidável 304 e Tungstênio.

MCP-20	Dissector em curva 45° 100x3mm E	
MCP-21	Dissector em curva 45° 158x3mm E	
MCP-22	Dissector em curva 45° 184x3mm E	
MCP-23	Dissector em contorno 155x3mm E	
MCP-24	Dissector em contorno 181x3mm E	
MCP-25	Dissector reto 40 x 2mm N	
MCP-26	Dissector reto 50 x 2mm N	
MCP-27	Dissector reto 60 x 2mm N	
MCP-28	Dissector reto 84x3mm N	
MCP-29	Dissector reto 100x3mm N	
MCP-30	Dissector reto 120x3mm N	
MCP-31	Dissector reto 152x3mm N	
MCP-32	Dissector reto 186x3mm N	
MCP-33	Dissector reto 52x3mm N sem isolante	
MCP-34	Dissector reto 62x3mm N sem isolante	
MCP-35	Dissector reto 46,5x45°x2mm N	
MCP-36	Dissector reto 50 x 45°x2mm N	
MCP-37	Dissector reto 60x45°x2 mm N	
MCP-38	Dissector reto 82,5x45°x3mm N	

MCP-39	Dissector reto 100x45°x3mm N	
MCP-40	Dissector reto 120x45°x3mm N	
MCP-41	Dissector reto 158,5x45°x3mm N	
MCP-42	Dissector reto 184,5x45°x3mm N	
MCP-43	Dissector 45° 50x2mm E	
MCP-44	Dissector 45° 60x2mm E	
MCP-45	Dissector 45° 86x2mm E	
MCP-46	Dissector 45° 112x2mm E	
MCP-47	Dissector 45° 137x3mm E	
MCP-48	Dissector 45° 162x2mm E	
MCP-49	Dissector 45° 188x2mm E	
MCP-50	Dissector 90° 45x2mm E	
MCP-51	Dissector Esférico 130mm x 0° x 3mm	
MCP-52	Dissector curvo 106x3mm E	
MCP-53	Dissector reto 135mm (comprimento total) – 90mm (comprimento haste) x 1.4mm (diâmetro)	
MCP-54	Dissector curvo 156x3mm E	
MCP-55	Dissector curvo 182x3mm E	
MCP-56	Dissector em curva 45° 108x3mm E	
MCP-57	Dissector em curva 45° 133x3mm E	
MCP-58	Dissector em curva 45° 158x3mm E	
MCP-59	Dissector em curva 45° 184x3mm E	
MCP-60	Dissector em contorno 155x3mm E	
MCP-70	Dissector em contorno 181x3mm E	

MCP-71	Dissector Reto Retrátil 40mm a 140mm x 3mm - B	
MCP-72	Dissector Reto Retrátil 75mm a 90mm x 3mm - B	
MCP-73	Dissector Reto Retrátil 125mm a 140mm x 3mm - B	
MCP-74	Dissector Reto Retrátil 25mm a 40mm x 3mm - N	
MCP-75	Dissector Reto Retrátil 40mm a 140mm x 3mm - N	

Produto de uso único. Destruir após o uso. Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada. VER INSTRUÇÕES DE USO. Proibido reprocessar. Produto estéril – esterilizado por gás de óxido de etileno.

1- FINALIDADE / INDICAÇÃO:

Procedimentos cirúrgicos monopolares onde é necessário ablação, coagulação, corte, dissecação e cauterização, dos tecidos nos joelhos, ombros, quadris, punhos, cotovelos, boca, nariz, coluna e cabeça.

2- INSTRUÇÕES DE USO:

- 1) Identificar o tamanho apropriado da Cânula a ser utilizada.
- 2) Conectar a Cânula de Microincisão na caneta cirúrgica.
- 3) Conectar a caneta cirúrgica com a Cânula de Microincisão já no bisturi elétrico.
- 4) Verificar se o paciente está com a placa neutra.
- 5) Verificar se a placa neutra está conectada ao bisturi elétrico.
- 6) Identificar o local a ser utilizado a Cânula de Microincisão Micro-Cort Plus.
- 7) Ajustar a força do bisturi elétrico;
- 8) É sempre indicado iniciar com força baixa e aumentar aos poucos.
- 9) A Cânula de Microincisão deve estar bem fixada à caneta monopolar e estar conectada ao equipamento bisturi elétrico. Inicialmente deve-se selecionar a potência do aparelho entre 3 e 5 Watts, aumentando gradativamente para melhor desempenho e eficiência do procedimento.

3- ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

O uso deste produto deve ser restrito a profissionais com competência para a utilização do mesmo. Deve-se ter cuidado a fim de prevenir perfurações ou traumas dos revestimentos e tecidos, canais ou dutos associados. Após a retirada dos produtos da embalagem, inspecione-os a

fim de detectar a existência de dobras, torções ou outros danos. Se for detectada qualquer anomalia que impossibilite seu funcionamento, os produtos não deverão ser utilizados. Entrar em contato com Humanna Medical (Tel/Fax: (55) 21 2010-7770).

4- CONTRA INDICAÇÕES:

É contra indicado em todos os casos onde não possa ser utilizado como procedimento proposto de ablação e corte de tecidos.

5- ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO:

Armazenar e transportar o produto em temperatura ambiente controlada (15 °C a 30 °C) em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Realizar periodicamente a rotação no estoque de forma que os produtos sejam utilizados antes da expiração da data de validade da esterilização indicada no rótulo.

6- AVISO:

A HUMANNA MEDICAL não se responsabilizará por quaisquer perdas, danos ou despesas incidentais, bem como pelo mau funcionamento do produto devido a utilização indevida/incorrecta do mesmo, incluindo o manuseio, armazenamento e uso em pacientes. A HUMANNA MEDICAL se abstém da responsabilidade referente a reutilização, reprocessamento ou reesterilização dos produtos.

7- FABRICADO POR:

HUMANNA MEDICAL LTDA

RUA ALIPHIA ZAHETER KFURI nº 80, VALE DO JEQUITIBÁ,
GUAPIMIRIM | RJ – BRASIL – CEP: 25946-610

Registro ANVISA: 81637610058

Responsável Técnico: Danilo Vieira de Alcantara - **CRF- RJ: 14094**

Site: www.humannamedical.com.br

E-mail: diretoria@humannamedical.com.br

Telefone: (21) 2010-7770