

INSTRUÇÃO DE USO

Descrição e Especificação Técnica:

Produto: Piezo Max

Nome Técnico: Ponta de Ultra-Som

Composição			
Aço inoxidável 304 AISI			
MODELO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	ILUSTRAÇÃO
PPO-01	Ponta para Osteotomia 4mm x 0,75mm	Indicada para corte de ossos corticais	
PPO-02	Ponta para Osteotomia 3mm x 1mm	Indicada para corte altamente sofisticado de ossos delicados e estreitos, cortando o osso com maior precisão e eficiência.	
PPO-03	Ponta para Osteotomia 4mm x 2mm	Indicada para cortar ossos mais duros e alcançar posições mais difíceis.	
PPO-04	Ponta para Osteotomia 4mm x 0,6mm - Direita	Ponta angular direita indicada para osteotomia de grande eficiência e enxertos em bloco.	
PPO-05	Ponta para Osteotomia 4mm x 0,6mm - Esquerda	Ponta angular esquerda indicada para osteotomia de grande eficiência e enxertos em bloco.	
PPO-06	Ponta Circular para Osteoplastia 04 x 15mm	Sua ponta arredondada facilita a raspagem do tecido ósseo.	
PPO-07	Ponta para Osteotomia 4mm x10mm	Indicada para cortes de ossos corticais.	
PPO-08	Ponta para Osteotomia 4mm x20mm	Ponta com aba indicada para desgastes ósseos em regiões próximas a tecidos moles, para procedimentos de elevação do seio maxilar.	
PPO-09	Ponta Bola para Osteotomia 2mm	Ponta esférica indicada para corte de tecido macio ou perto de regiões sensíveis. Ponta bola.	

PPO-10	Ponta Cônica Curta 3mm	Ponta cônica curta indicada para descolar a camada mucosa nasal no maxilar superior, protegendo os órgãos para o maior grau. Em forma lisa e plana.	
PPO-11	Ponta Bola para Osteotomia 3mm	Ponta Esférica Indicada para corte de tecido macio ou perto de regiões sensíveis. Ponta Bola	
PPO-12	Ponta Bola para Osteotomia 4mm	Ponta Esférica Indicada para corte de tecido macio ou perto de regiões sensíveis. Ponta Bola.	
PPO-13	Ponta Bola para Osteotomia 1,8mm	Ponta Esférica Indicada para corte de tecido macio ou perto de regiões sensíveis. Ponta Bola.	
PPO-14	Ponta Reta para Osteoplastia 4mmx 0,55mm	Usado para osteotomia, mais preciso e eficiente com marcação de 7-8.5-10 mm na superfície de profundidade.	
PPO-15	Ponta Faca 5mm x 0,6mm	Instrumento para extração atraumática com preservação óssea.	
PPO-16	Ponta de Recorte 4mm x 5,55mm	Especial para cortes finos e profundos em tempo recorde. Especialmente adequado para a colheita de blocos ósseos, dividindo a crista alveolar, separando as raízes dos dentes e para ressecções da ponta da raiz.	
PPO-17	Ponta Cônica 2,5mm x 10mm	Instrumento de desprendimento suave da membrana.	

Produto de uso único. Destruir após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada.

VER INSTRUÇÕES DE USO.

Proibido reprocessar. Produto estéril – esterilizado por gás de óxido de etileno.

1- FINALIDADE / INDICAÇÃO:

O Piezo Max é indicado para cirurgias onde seja necessário realizar Osteotomias (corte / furo / dissecção). A ponta de Piezo Max funciona através de microvibrações geradas por uma força ultrassônica.

2- INTRUÇÕES DE USO:

- 1) Posicione o paciente de acordo com o procedimento;
- 2) O procedimento deve ser feito sob fluoroscopia ou ultrassonografia;
- 3) Verifique se a Ponta é adequada para o paciente.
- 4) Verifique se a Ponta Piezo Max é compatível com o motor cirúrgico de micro vibração a ser utilizado.
- 5) Conecte a Ponta Piezo Max na peça de mão do motor cirúrgico de micro vibração a ser utilizado.
- 6) Atenção: Inicie sempre com vibrações baixas e vá aumentando conforme necessário.
- 7) Após o término do procedimento, desconecte a Ponta Piezo Max da peça de mão do motor.
- 6) Após o uso, elimine o produto de acordo com os procedimentos padrão para resíduos com potencial risco biológico.

OBS: As informações acima são apenas orientativas, devendo o profissional habilitado selecionar a melhor técnica cirúrgica para cada paciente.

Nota 1: Examinar cuidadosamente o produto e a embalagem estéril a fim de confirmar a inexistência de danos durante o transporte, além de verificar, na rotulagem do produto, se o tamanho da cânula é indicado para o procedimento a ser realizado.

Nota 2: Realizar técnicas assépticas durante todo o procedimento incluindo a utilização de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), campos e instrumentos estéreis.

3- CONTRA INDICAÇÕES:

É contra indicado em casos em que o paciente não tolere procedimentos cirúrgicos.

4- ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO:

Armazenar e transportar o produto em temperatura ambiente controlada (15 °C a 30 °C) em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Realizar periodicamente a rotação no estoque de forma que os produtos sejam utilizados antes da expiração da data de validade da esterilização indicada no rótulo.

5- **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:**

O uso deste produto deve ser restrito a profissionais com competência para a utilização do mesmo. Deve-se ter cuidado a fim de prevenir perfurações ou traumas dos revestimentos e tecidos, canais ou dutos associados. Após a retirada dos produtos da embalagem, inspecione-os a fim de detectar a existência de dobras, torções ou outros danos. Se for detectada qualquer anomalia que impossibilite seu funcionamento, os produtos não deverão ser utilizados. Entrar em contato com Humanna Medical.

6- **AVISO:**

A HUMANNA MEDICAL não se responsabilizará por quaisquer perdas, danos ou despesas incidentais, bem como pelo mau funcionamento do produto devido utilização indevida/incorrecta do mesmo, incluindo o manuseio, armazenamento e uso em pacientes (procedimentos cirúrgicos e diagnósticos). A HUMANNA MEDICAL se abstém da responsabilidade referente a reutilização, reprocessamento ou reesterilização dos produtos, como também de outros assuntos fora do controle da indústria.

7- **FABRICADO POR:**

HUMANNA MEDICAL LTDA.

RUA ALIPHIA ZAHETER KFURI nº 80, VALE DO JEQUITIBÁ,
GUAPIMIRIM | RJ – BRASIL – CEP: 25946-610

Registro ANVISA: 81637610060

Responsável Técnico: Danilo Vieira de Alcantara / CRF- RJ: 14094

Site: www.humannamedical.com.br

E-mail: diretoria@humannamedical.com.br

Telefone: +5521 2010-7770