

## INSTRUÇÃO DE USO

**Descrição e Especificação Técnica:**

**Nome Técnico:** Cânulas

**Nome Comercial:** Cânula Free-Pain

| Composição                                  |
|---------------------------------------------|
| Aço inoxidável 304 AISI e Poliacetal F1855. |

| Modelos | Diâmetro        | Comprimento |
|---------|-----------------|-------------|
| CFP-100 | 0.812mm (20Ga)  | 100.0mm     |
| CFP-200 | 0.644mm (22Ga)  | 50.0mm      |
| CFP-300 | 0.812mm (20Ga)  | 150.0mm     |
| CFP-500 | 0.644mm (22Ga)  | 100.0mm     |
| CFP-600 | 00.812mm (20Ga) | 50.0mm      |
| CFP-800 | 0.644mm (22Ga)  | 150.0mm     |

**Produto de uso único.**

**Destruir após o uso.**

**Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada.**

**VER INSTRUÇÕES DE USO.**

**Proibido reprocessar.**

**Produto estéril – esterilizado por gás de óxido de etileno.**

## **1- ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:**

Verificar se a embalagem está íntegra e sem sinais de violação; Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica; O Fabricante recomenda o Uso Único; Produto de uso exclusivamente profissional; Abrir a embalagem somente em local limpo, sob condições de assepsia, no momento do uso; Manusear o produto com as mãos higienizadas e protegidas com luvas; Verificar a integridade do produto antes do uso, observando eventuais danos mecânicos (torta, amassada ou quebrada); A esterilidade do conteúdo só é garantida com a embalagem íntegra, sem dobras ou perfurações.

## **2- FINALIDADE / INDICAÇÃO:**

A Cânula Free-Pain é indicada para efetuar o acesso até o nervo. A cânula faz acesso para instrumentos como faca/fio guia/trefina. O produto funciona manualmente com a inserção da cânula através da pele.

## **3- CONTRA INDICAÇÕES:**

A Cânula Free-Pain é contraindicada em pacientes que não tolerem procedimentos cirúrgicos.

## **4- INSTRUÇÕES DE USO:**

- 1 - Utilize técnicas estéreis durante os procedimentos descritos abaixo;
- 2 - Posicione o paciente de acordo com a localização do ponto a ser atingido;
- 3 - Faça uma desinfecção no local;
- 4 - Localize através de fluoroscopia o ponto que deseja puncionar;
- 5 - Selecione a cânula a ser utilizada dentre os tamanhos disponíveis;

- 6 - Empurre a cânula com acompanhamento fluoroscópico em direção ao ponto desejado;
- 7 - Introduza o Instrumento (Fio Guia /Fava Corte /Trefina);
- 8 - Retire o instrumento;
- 9 - Realize uma imagem de Fluoroscopia para controle;
- 10 - Retire a Cânula Free-Pain.

***OBS: As informações acima são apenas orientativas, devendo o profissional de saúde avaliar o melhor método para o paciente.***

***OBS: OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NÃO FAZEM PARTE DESTA REGISTRO, DEVENDO SER ADQUIRIDO E REGISTRADO SEPARADAMENTE.***

#### **5- ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO:**

Armazenar e transportar o produto em temperatura ambiente controlada (15 °C a 30 °C) em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Realizar periodicamente a rotação no estoque de forma que os produtos sejam utilizados antes da expiração da data de validade da esterilização indicada no rótulo.

#### **6- AVISO:**

A HUMANNA MEDICAL informa aos seus clientes que foram adotados todos os cuidados na concepção e fabricação deste produto. A HUMANNA MEDICAL não se responsabilizará por quaisquer perdas, danos ou despesas incidentais, bem como pelo mau funcionamento do produto devido utilização indevida/ incorreta.

**7- FABRICADO POR:**

**HUMANNA MEDICAL LTDA**

RUA ALIPHIA ZAHETER KFURI nº 80, VALE JEQUITIBÁ,

GUAPIMIRIM | RJ – BRASIL

CEP: 25946-610

**Registro ANVISA: 81637610073**

**Responsável Técnico:** Danilo Vieira de Alcantara

**CRF- RJ:** 14094

**Site:** [www.humannamedical.com.br](http://www.humannamedical.com.br)

**E-mail:** [diretoria@humannamedical.com.br](mailto:diretoria@humannamedical.com.br)

**Telefone:** +55 21 2010-7770