

## INSTRUÇÃO DE USO

### Descrição e Especificação Técnica:

**Nome Técnico:** Lâminas Descartáveis

**Nome Comercial:** CÂNULA DE VERRUMA RESIDUAL

| Composição                                                                             |          |             |        |                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|---------------------|------------------------|
| Base: Alumínio liga 6351 / Cânula Verruma: Aço Inoxidável 304 (Norma Técnica AISI 304) |          |             |        |                     |                        |
| Referência                                                                             | Diâmetro | Comprimento | Ângulo | Ponta               | Conexão                |
| CVRO3.5-200                                                                            | 3.5mm    | 200,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVRO3.5-300                                                                            | 3.5mm    | 300,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVRO3.5-400                                                                            | 3.5mm    | 400,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVRO4-200                                                                              | 4.0mm    | 200,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVRO4-300                                                                              | 4.0mm    | 300,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVRO4-400                                                                              | 4.0mm    | 400,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVRO4.5-200                                                                            | 4.5mm    | 200,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVRO4.5-300                                                                            | 4.5mm    | 300,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVRO4.5-400                                                                            | 4.5mm    | 400,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVRO5-200                                                                              | 5.0mm    | 200,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVRO5-300                                                                              | 5.0mm    | 300,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVRO5-400                                                                              | 5.0mm    | 400,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVRO5.5-200                                                                            | 5.5mm    | 200,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVRO5.5-300                                                                            | 5.5mm    | 300,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVRO5.5-400                                                                            | 5.5mm    | 400,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVR3.5-300                                                                             | 3.5mm    | 300,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVR3.5-400                                                                             | 3.5mm    | 400,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVR4.5-300                                                                             | 4.5mm    | 300,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVR4.5-400                                                                             | 4.5mm    | 400,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVR5-300                                                                               | 5.0mm    | 300,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVR5-400                                                                               | 5.0mm    | 400,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVR5.5-300                                                                             | 5.5mm    | 300,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVR5.5-400                                                                             | 5.5mm    | 400,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVRA3.5-200                                                                            | 5.5mm    | 200,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVRA5.5-300                                                                            | 5.5mm    | 300,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |
| CVRA5.5-400                                                                            | 5.5mm    | 400,0mm     | 0°     | Diamantada/Cortante | Stryker/Razek/Linvatec |

|                    |       |         |    |            |          |
|--------------------|-------|---------|----|------------|----------|
| CVR-C-B-3.5-280-SK | 3.5mm | 280,0mm | 0° | Cortante   | Stryker  |
| CVR-D-B-3.5-280-SK | 3.5mm | 280,0mm | 0° | Diamantada | Stryker  |
| CVR-P-B-3.5-280-SK | 3.5mm | 280,0mm | 0° | Protegida  | Stryker  |
| CVR-C-B-3.5-350-SK | 3.5mm | 350,0mm | 0° | Cortante   | Stryker  |
| CVR-D-B-3.5-350-SK | 3.5mm | 350,0mm | 0° | Diamantada | Stryker  |
| CVR-P-B-3.5-350-SK | 3.5mm | 350,0mm | 0° | Protegida  | Stryker  |
| CVR-C-B-5.0-280-SK | 5.0mm | 280,0mm | 0° | Cortante   | Stryker  |
| CVR-D-B-5.0-280-SK | 5.0mm | 280,0mm | 0° | Diamantada | Stryker  |
| CVR-P-B-5.0-280-SK | 5.0mm | 280,0mm | 0° | Protegida  | Stryker  |
| CVR-C-B-5.5-280-SK | 5.5mm | 280,0mm | 0° | Cortante   | Stryker  |
| CVR-D-B-5.5-280-SK | 5.5mm | 280,0mm | 0° | Diamantada | Stryker  |
| CVR-P-B-5.5-280-SK | 5.5mm | 280,0mm | 0° | Protegida  | Stryker  |
| CVR-C-B-6.0-280-SK | 6.0mm | 280,0mm | 0° | Cortante   | Stryker  |
| CVR-D-B-6.0-280-SK | 6.0mm | 280,0mm | 0° | Diamantada | Stryker  |
| CVR-P-B-6.0-280-SK | 6.0mm | 280,0mm | 0° | Protegida  | Stryker  |
| CVR-C-B-3.5-280-LV | 3.5mm | 280,0mm | 0° | Cortante   | Linvatec |
| CVR-D-B-3.5-280-LV | 3.5mm | 280,0mm | 0° | Diamantada | Linvatec |
| CVR-P-B-3.5-280-LV | 3.5mm | 280,0mm | 0° | Protegida  | Linvatec |
| CVR-C-B-3.5-350-LV | 3.5mm | 350,0mm | 0° | Cortante   | Linvatec |
| CVR-D-B-3.5-350-LV | 3.5mm | 350,0mm | 0° | Diamantada | Linvatec |
| CVR-P-B-3.5-350-LV | 3.5mm | 350,0mm | 0° | Protegida  | Linvatec |
| CVR-C-B-5.0-280-LV | 5.0mm | 280,0mm | 0° | Cortante   | Linvatec |
| CVR-D-B-5.0-280-LV | 5.0mm | 280,0mm | 0° | Diamantada | Linvatec |
| CVR-P-B-5.0-280-LV | 5.0mm | 280,0mm | 0° | Protegida  | Linvatec |
| CVR-C-B-5.5-280-LV | 5.5mm | 280,0mm | 0° | Cortante   | Linvatec |
| CVR-D-B-5.5-280-LV | 5.5mm | 280,0mm | 0° | Diamantada | Linvatec |
| CVR-P-B-5.5-280-LV | 5.5mm | 280,0mm | 0° | Protegida  | Linvatec |
| CVR-C-B-6.0-280-LV | 6.0mm | 280,0mm | 0° | Cortante   | Linvatec |
| CVR-D-B-6.0-280-LV | 6.0mm | 280,0mm | 0° | Diamantada | Linvatec |
| CVR-P-B-6.0-280-LV | 6.0mm | 280,0mm | 0° | Protegida  | Linvatec |
| CVR-C-B-3.5-280-WF | 3.5mm | 280,0mm | 0° | Cortante   | Wolf     |
| CVR-D-B-3.5-280-WF | 3.5mm | 280,0mm | 0° | Diamantada | Wolf     |
| CVR-P-B-3.5-280-WF | 3.5mm | 280,0mm | 0° | Protegida  | Wolf     |
| CVR-C-B-3.5-350-WF | 3.5mm | 350,0mm | 0° | Cortante   | Wolf     |

|                    |       |         |    |            |      |
|--------------------|-------|---------|----|------------|------|
| CVR-D-B-3.5-350-WF | 3.5mm | 350,0mm | 0° | Diamantada | Wolf |
| CVR-P-B-3.5-350-WF | 3.5mm | 350,0mm | 0° | Protegida  | Wolf |
| CVR-C-B-5.0-280-WF | 5.0mm | 280,0mm | 0° | Cortante   | Wolf |
| CVR-D-B-5.0-280-WF | 5.0mm | 280,0mm | 0° | Diamantada | Wolf |
| CVR-P-B-5.0-280-WF | 5.0mm | 280,0mm | 0° | Protegida  | Wolf |
| CVR-C-B-5.5-280-WF | 5.5mm | 280,0mm | 0° | Cortante   | Wolf |
| CVR-D-B-5.5-280-WF | 5.5mm | 280,0mm | 0° | Diamantada | Wolf |
| CVR-P-B-5.5-280-WF | 5.5mm | 280,0mm | 0° | Protegida  | Wolf |
| CVR-C-B-6.0-280-WF | 6.0mm | 280,0mm | 0° | Cortante   | Wolf |
| CVR-D-B-6.0-280-WF | 6.0mm | 280,0mm | 0° | Diamantada | Wolf |
| CVR-P-B-6.0-280-WF | 6.0mm | 280,0mm | 0° | Protegida  | Wolf |

**Produto de uso único. Destruir após o uso. Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada. VER INSTRUÇÕES DE USO. Proibido reprocessar.**

**Produto estéril – esterilizado por gás de óxido de etileno.**

### **1- FINALIDADE / INDICAÇÃO:**

A Cânula de Verruma Residual é indicada para cortar, succionar, perfurar nas seguintes aplicações cirúrgicas: Artrites e sinovites do ombro; Bursoscopia ou endoscopia do espaço subacromial; Cirurgia da articulação acromioclavicular; Desbridamento da articulação do quadril na osteoartrose; Desbridamento da artrite séptica; Cirurgia da coluna vertebral; Lesões condriais por desbridamento; Lesões do ligamento da cabeça do fêmur; Lesões da longa porção do bíceps; Lesões do ombro; Lesões de ligamentos; Lesões do manguito rotador; Lesões de menisco.

### **2- CONTRA INDICAÇÕES:**

Nenhuma conhecida.

### **3- INSTRUÇÕES DE USO:**

#### **INSTRUÇÕES DE USO DA CANULA DE VERRUMA RESIDUAL**

- 1) Como em todos os procedimentos, requer estrita fidelidade à técnica estéril.
- 2) Examine o produto antes de utilizá-lo.
- 3) Verificar se o produto se aplica à finalidade desejada em relação ao modelo do produto.

- 4) Preparar o paciente de acordo com o protocolo correspondente à técnica utilizada.
- 5) Conecte a cânula de debridação na peça de mão do motor shaver.
- 6) Atenção: Inicie sempre com forças baixas e vá aumentando conforme necessário.
- 7) Desconecte a cânula de debridação da peça de mão do motor.
- 8) Após o uso, elimine o produto de acordo com os procedimentos padrão para resíduos com potencial risco biológico.

#### **4- ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:**

O uso deste produto deve ser restrito a profissionais com competência para a utilização do mesmo. Deve-se ter cuidado a fim de prevenir perfurações ou traumas dos revestimentos e tecidos, canais ou dutos associados.

#### **5- ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO:**

Armazenar e transportar o produto em temperatura ambiente controlada (15 °C a 30 °C) em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Realizar periodicamente a rotação no estoque de forma que os produtos sejam utilizados antes da expiração da data de validade da esterilização indicada no rótulo.

#### **6- AVISO:**

A HUMANNA MEDICAL não se responsabilizará por quaisquer perdas, danos ou despesas incidentais, bem como pelo mau funcionamento do produto devido utilização indevida/ incorreta do mesmo, incluindo o manuseio, armazenamento e uso em pacientes (procedimentos cirúrgicos e diagnósticos).

#### **7- FABRICADO POR:**

HUMANNA MEDICAL LTDA - RUA ALIPHIA ZAHETER KFURI nº 80, VALE DO JEQUITIBÁ, GUAPIMIRIM | RJ – BRASIL – CEP: 25946-610

**Registro ANVISA: 81637610096**

**Responsável Técnico:** Danilo Vieira de Alcantara

**CRF- RJ:** 14094

**Site:** [www.humannamedical.com.br](http://www.humannamedical.com.br)

**E-mail:** [diretoria@humannamedical.com.br](mailto:diretoria@humannamedical.com.br)

**Telefone:** +55 21 2010-7770