

INSTRUÇÃO DE USO

Descrição e Especificação Técnica:

Nome Técnico: Lâminas Descartáveis

Nome Comercial: Cânula de Hemostasia e Nivelção Óssea Hi-Rotation

Composição

Peça de mão: Alumínio liga 6351 + Polipropileno / Cânula de corte e sucção: Aço Inoxidável AISI 304 / Cânula Guia: Aço Inoxidável AISI 304 / Ponta: Carbureto de tungstênio sobre hastas de aço inoxidável + Aço Inoxidável AISI 304 + Pó de Diamante.

Referência	Diâmetro	Comprimento	Ponta/Conexão
NOHT-3.5-90	3.5mm	90,0mm	Cortante / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHT-3.5-150	3.5mm	150,0mm	Cortante / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHT-3.5-200	3.5mm	200,0mm	Cortante / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHT-3.5-300	3.5mm	300,0mm	Cortante / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHT-3.5-400	3.5mm	400,0mm	Cortante / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHT-3.5-300	3.5mm	300,0mm	Cortante / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHT-3.5-400	3.5mm	400,0mm	Cortante / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHT-5.5-90	5.5mm	90,0mm	Cortante / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHT-5.5-150	5.5mm	150,0mm	Cortante / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHT-5.5-200	5.5mm	200,0mm	Cortante / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHT-5.5-300	5.5mm	300,0mm	Cortante / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHT-5.5-400	5.5mm	400,0mm	Cortante / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTP-3.5-90	3.5mm	90,0mm	Protegida Oval / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTP-3.5-150	3.5mm	150,0mm	Protegida Oval / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTP-3.5-200	3.5mm	200,0mm	Protegida Oval / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTP-3.5-300	3.5mm	300,0mm	Protegida Oval / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTP-3.5-400	3.5mm	400,0mm	Protegida Oval / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTP-3.5-300	3.5mm	300,0mm	Protegida Oval / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTP-3.5-400	3.5mm	400,0mm	Protegida Oval / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTP-5.5-90	5.5mm	90,0mm	Protegida Oval / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTP-5.5-150	5.5mm	150,0mm	Protegida Oval / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTP-5.5-200	5.5mm	200,0mm	Protegida Oval / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTP-5.5-300	5.5mm	300,0mm	Protegida Oval / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTP-5.5-400	5.5mm	400,0mm	Protegida Oval / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTPD-D3.5-90	3.5mm	90,0mm	Diamantada / Stryker, Razek, Linvatec.

Instrução de Uso – Cânula de Hemostasia e Nivelção Óssea Hi-Rotation

Revisão 02 - 07/10/2024 - Página 1 de 4

NOHTPD-3.5-150	3.5mm	150,0mm	Diamantada / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTPD-3.5-200	3.5mm	200,0mm	Diamantada / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTPD-3.5-300	3.5mm	300,0mm	Diamantada / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTPD-3.5-400	3.5mm	400,0mm	Diamantada / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTPD-3.5-300	3.5mm	300,0mm	Diamantada / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTPD-3.5-400	3.5mm	400,0mm	Diamantada / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTPD-5.5-90	5.5mm	90,0mm	Diamantada / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTPD-5.5-150	5.5mm	150,0mm	Diamantada / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTPD-5.5-200	5.5mm	200,0mm	Diamantada / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTPD-5.5-300	5.5mm	300,0mm	Diamantada / Stryker, Razek, Linvatec.
NOHTPD-5.5-400	5.5mm	400,0mm	Diamantada / Stryker, Razek, Linvatec.

Produto de uso único. Destruir após o uso. Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada. VER INSTRUÇÕES DE USO. Proibido reprocessar. Produto estéril – esterilizado por gás de óxido de etileno.

1- ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

A Humanna Medical não assume nenhuma responsabilidade relativa a produtos reutilizados, reprocessados ou reesterilizados. Não utilizar o produto com prazo de validade expirado. O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim senão aquele que especificamente se destina. Deve-se ter cuidado a fim de prevenir perfurações ou traumas dos revestimentos e tecidos, canais ou ductos associados.

Após a retirada dos produtos da embalagem, inspecione-os a fim de detectar a existência de dobras, torções ou outros danos. Se for detectada qualquer anomalia que impossibilite seu funcionamento os produtos não deverão ser utilizados. Entrar em contato com Humanna Medical.

2- FINALIDADE / INDICAÇÃO:

A Cânula de Hemostasia e Nivelção Óssea Hi-Rotation é indicada para realizar a hemostasia óssea simultaneamente as funções de cortar, succionar, perfurar nas seguintes aplicações cirúrgicas:

- Artrites e sinovites do ombro;

- Bursoscopia ou endoscopia do espaço subacromial;
- Cirurgia da articulação acromioclavicular;
- Desbridamento da articulação do quadril na osteoartrose;
- Desbridamento da artrite séptica;
- Cirurgia da coluna vertebral
- Exérese de corpos livres;
- Lesões da coifa dos rotadores;
- Lesões condriais por desbridamento;
- Lesões do ligamento da cabeça do fêmur;
- Lesões da longa porção do bíceps;
- Lesões do ombro, de ligamentos, do manguito rotator, de menisco;
- Lesões de tendão muscular, tendinite calcária do ombro;
- Ombro congelado;
- Síndrome do impacto ulno-carpal;
- Cirurgias otorrinolaringológicas;
- Articulação Têmporo-Mandibular (ATM);
- Cirurgias de Buco-maxilo;
- Cirurgias de uso em urologia;

3- CONTRA INDICAÇÕES:

Nenhuma conhecida.

4- INSTRUÇÕES DE USO:

- 1) Como em todos os procedimentos, requer estrita fidelidade à técnica estéril.
- 2) Examine o produto antes de utilizá-lo.
- 3) Verificar se o produto se aplica à finalidade desejada em relação ao modelo do produto.
- 4) Preparar o paciente de acordo com o protocolo correspondente à técnica utilizada.
- 5) Conecte a Cânula de Hemostasia e Nivelção Óssea Hi-Rotation na peça de mão do motor shaver.

- 6) **Atenção:** Inicie sempre com forças baixas e vá aumentando conforme necessário.
- 7) Desconecte a Cânula de Hemostasia e Nivelação Óssea Hi-Rotation da peça de mão do motor.
- 8) Após o uso, elimine o produto de acordo com os procedimentos padrão para resíduos com potencial risco biológico.

5- **ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO:**

Armazenar e transportar o produto em temperatura ambiente controlada (15 °C a 30 °C) em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Realizar periodicamente a rotação no estoque de forma que os produtos sejam utilizados antes da expiração da data de validade da esterilização indicada no rótulo.

6- **AVISO:**

A HUMANNA MEDICAL informa aos seus clientes que foram adotados todos os cuidados na concepção e fabricação deste produto. A HUMANNA MEDICAL não se responsabilizará por quaisquer perdas, danos ou despesas incidentais, bem como pelo mau funcionamento do produto devido utilização indevida/ incorreta.

7- **FABRICADO POR:**

HUMANNA MEDICAL LTDA.

RUA ALIPHIA ZAHETER KFURI nº 80, VALE JEQUITIBÁ,
GUAPIMIRIM | RJ – BRASIL – CEP: 25946-610

Registro ANVISA: 81637619044

Responsável Técnico: Danilo Vieira de Alcantara / CRF- RJ: 14094

Site: www.humannamedical.com.br

E-mail: diretoria@humannamedical.com.br

Telefone: (21) 2010-7770